

Használati útmutató orvostechnikai eszkuhöz

MEDISTUS DIRECT ORRSPRAY 30 ml

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz az Ön számára a MEDISTUS DIRECT ORRSPRAY alkalmazásával kapcsolatban. Tartsa meg a tájékoztatót, hogy szükség esetén újra el tudja olvasni.

Aktívösszetevő-tartalom 1 adagban (0,1 ml):

Tengervíz az Atlanti-óceán mélyéről 13,72 mg, D-panthenol 0,5 mg, hialuronsav 0,9 mg.

Egyéb összetevők:

Demineralizált víz, glicerin, kálium-szorbát, eukaliptuszolaj, borsmentaolaj.

Készereles:

Orvostechnikai eszköz spray (folyadékkal, és orrspray-adagolófejjel ellátva) 30 ml-es flakonban (300 adag).

Alkalmazási terület:

A MEDISTUS DIRECT ORRSPRAY a következő esetekben kiegészítő kezelésként alkalmazható:

- az orrnyálkahártya nedvesítésére és tisztítására,
- az orrnyálkahártya gyulladással állapota enyhítésére,
- nátha, allergiás nátha miatt fellépő orrdugulás megszüntetésére,
- a légzés megkönnyítésére,
- az orrüreg napi tisztántartására.

Felhasználási javallat:

A terméket felnőttek és 6 évesnél idősebb gyermekek alkalmazhatják.

Ellenjavallatok és figyelmeztetések:

Ne használja a terméket, ha Ön túlérzékeny (allergiás) annak bármely összetevőjével szemben.

Kerülje a termék szembe kerülését. Ha bármilyen kellemetlen érzés jelentkezik, hagyja abba a használatát. Az orvostechnikai eszközzel kapcsolatos minden súlyos mellékhatást jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Ne használja a lejáratú idő után.

Az orvostechnikai eszköz várakozás és szoptatás ideje alatti alkalmazásáról kérje ki orvosa véleményét.

Használati utasítás:

Az első használat előtt többször nyomja meg az adagolófejet, hogy megteljen folyadékkal. Helyezze az adagolófejet az orrnyílásba, és annak megnyomásával mindkét orrjáratba fújjon be a sprayből.

Ajánlott adagolás 6 éves kor feletti gyermekeknek és felnőtteknek: napi 2-3 alkalommal 1-3 fújás orrlyukanként. Higiéniai okokból és a kórokozók terjedésének megakadályozása érdekében egy flakont csak egy személy használjon. Az adagolófej végét minden használat után folyó víz alatt tisztítsa meg és törölje óvatosan szárazra.

Tárolás:

5°C–25°C közötti hőmérsékleten, az eredeti csomagolásban tárolandó.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Ne használja, ha a csomagolás sérült.

 Gyártó: GLOBAL PHARMA CM S.A.

ul. Berezów 49A,
26-130 Suchedniów

 VitaPlus

Forgalmazó: VitaPlus Kft.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.,
1. torony, 5. emelet

 ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ

A használati utasítás elkészítésének dátuma: 08/2023

A felhasznált szimbólumok magyarázata:

SZIMBÓLUM HASZNÁLAT/ JELENTÉS



Gyártási tételszám



Lejárat napja



CE – tanúsítja az európai uniós előírásoknak való megfelelést



Tárolási hőmérséklet-tartomány



Ne használja, ha a csomagolás sérült



Gyártó



Olvassa el a termékhez mellékelt használati utasítást!